



ÖRDEK-SÜRGÜ MAKİNESİ KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

DOKÜMAN NO	HB.TL.11
YAYIN TARİHİ	23.03.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	-
SAYFA	1 / 1

- AMAÇ:** Bu talimatın amacı, ördek ve sürgü yıkama makinalarının kullanımına yönelik bir sistem oluşturmaktır.
- KAPSAM:** Talimat hastanede Ördek ve Sürgü Yıkama Makinesi Kullanılan tüm birimleri ve bu birimlerin hem personel ve hasta bakıcı bay ve bayan personelini kapsar.
- KISALTMALAR:**
 - HBYS:** Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
- TANIMLAR:** -
- SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından bay-bayan hasta bakıcı personeller, denetlenmesinden servis hemireleri sorumludur.
- FAAL YETKİLER:**
 - Makinanın altında bulunan dolap kısmından, öncelikle deterjanın yeterli olup-olmadığı kontrol edilir.
 - Deterjan yeterli seviyede değilse deterjan ilave edilir.
 - Yıkınacak malzeme kirliliğine göre kontrol edilir.
 - Az kirli ise, kısa program; Orta derecede kirli ise, normal program; Çok kirli ise, yoğun program olarak seçilerek yıkama programı belirlenir.
 - Cihaz hangi programda çalışıyorsa çalıştığı program üzerindeki lamba yanar.
 - Eğer makinanın alt kısmındaki kırmızı lambası yanıyorsa işlem yeniden gözden geçirilir.
 - Makine sinyal veriyorsa servis sorumlu hemiresine haber verilir. Servis Sorumlu Hemiresi HBYS üzerinden arıza bakım onarım istenince Biyomedikal ve Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısına gönderilir.
 - Makine üzerindeki ok işaretleri ile istendiğinde manuel ısı uyarı yapılabilir.
- LG L DOKÜMANLAR:** -

HAZIRLAYAN SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAHEKİM
--	---	----------------------