



HEMODİYALİZ ÜNİTESİ SU ARITMA SİSTEMİ ÇALIŞMA TALİMATI

DOKÜMAN NO	D .TL01
YAYIN TARİHİ	23.03.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	-
SAYFA	1 / 1

- AMAÇ:** Bu talimatın amacı, Su arıtma sisteminin çalışmasına ve bakımına yönelik bir sistem oluşturulmasıdır.
- KAPSAM:** Hemodiyaliz Ünitesi çalışmalarını kapsamaktadır.
- KISALTMALAR:**
 - UF: Ultra Filtrasyon
- TANIMLAR:** -
- SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından Hemodiyaliz Hemşireleri, denetlenmesinden Sorumlu Müdürler sorumludur.
- FAAL YETKİLER:**
 - ebeke suyunun ana vanasını kontrol ederek açık olmasını sağlayınız.
 - Klorlama tankının içini kontrol ederek klor olmasını sağlayınız.
 - Kaba tortu filtresi yıkama vanasını açınız. Beş dakika sonra kapatınız.
 - Kaba tortu disposable filtrenin temizlik kontrolünü yapınız. Kirli ise değiştiriniz.
 - Ham su tank hidroforunun arterini açınız.
 - Kaba tortu yumu atıcı, karbon saf filtrelerinin takılı olmasını sağlayınız.
 - Yumuşatıcı tuz tankında tablet tuzun olup-olmadığını kontrol ediniz. Yoksa tablet tuz koyunuz.
 - R-O ON-OFF alterlerini ON ya da 1 konumuna getirerek açınız.
 - Saf su üretimini kontrol ediniz. Kondüktivitenin sabitlemesini kontrol ederek (5-50) arası olmasını sağlayınız.
 - Servis hidroforunun vanalarını kontrol ediniz, alterlerini açınız.
 - UF lambasının fişini kontrol ederek takınız.
 - Her hafta Pazartesi günleri disposable filtrelerin değişimini yapınız.
 - Arıza durumunda Biomedikal atölyesine haber veriniz.
- LG L DÖKÜMANLAR:** -

HAZIRLAYAN SALIK HİZMETLER MÜDÜRÜ	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİMİ D REKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAHEKİM
---	---	----------------------

